

眼乾及眼角膜受損人士 需要有效緩解方法

若果經常感到眼乾
眼角膜可能已經受到損害¹

眼部手術前，手術時及手術後
有很多因素會導致眼角膜受損²



VisuXL® 維舒滴® 潤眼液

蘊含獨特配方

交聯透明質酸、輔酶Q10及維生素E TPGS

一瓶10毫升，每日兩滴⁷

高科技設計瓶身

不含防腐劑

開封後可保存 180 天⁷

配戴隱形眼鏡人士適用⁷

意大利製造⁷

參考：

1. Bron AJ et al. *Cornea* 2003;22(7):640-650.
2. Behndig A et al. *J Cataract Refract Surg* 2015;41(12):2635-2643.
3. Gumus K. *Eye & Contact Lens* 2017;43 (2):73-80.
4. Fogagnolo P et al. *Ophthalmologica* 2013;229(1):26-31.
5. Mencucci R et al. *IOVS* 2014;55(11):7266-7271.
6. Brancato R et al. *J Refractive Surgery* 2002;18:135-139.
7. VisuXL IFU 9/2017.
8. Muzzi M & Mencucci R. AOPT 13th Scientific Meeting, Feb 16-19 2017, Florence Italy. Poster.
9. Brancato R, et al. *Eur J Ophthalmol* 2000;10:32-8.
10. Postorino EI, et al. *Eur J Ophthalmol*.2018;28(1):25-31.

研究設計報告指出有輕微至中度乾眼症狀人士，每日使用交聯透明質酸 (VisuXL®) 比線性透明質酸證實效果更顯著。

VISUfarma
the eye health company

總代理：

KERRY
PHARMA
嘉里醫藥

+852 2211 3799 +852 2408 8905
HK.KerryPharma.Order@kerrylogistics.com
<https://www.kerrypharma.com.hk>

VisuXL® 維舒滴® 潤眼液

有助紓緩及改善眼乾情況
(獨特配方)

開封後可保存180天



意大利製造



VISUXL202312V5

獨特配方主要成份有：

**輔酶Q10
維生素E TPGS**

天然抗氧化劑⁴
自由基清道夫⁹
減少細胞凋亡⁶


交聯透明質酸

每日只需兩滴⁷
保留時間比
線性透明質酸持久三倍⁸

VisuXL® 維舒滴® 潤眼液

▶ 根據OSDI的評估，使用過VisuXL®獨特配方組合人士認為比現時線性透明質酸效果更佳¹⁰

*線性透明質酸 = HA

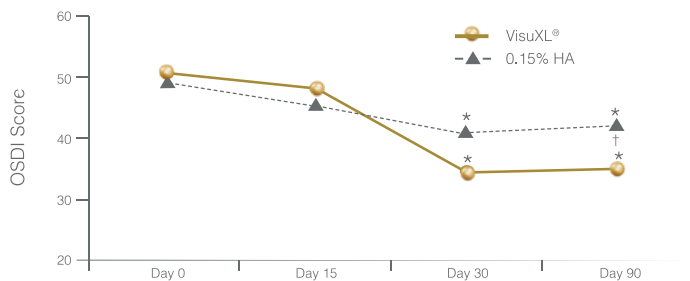

圖表改編自 Postorino E.I. et al. 2018

*P<0.05 vs 使用前及使用後第15日；同時†P=0.05 vs 0.15% HA

▶ 使用人士認為在眼部手術後的恢復過程中，使用含交聯透明質酸的VisuXL®對眼角膜康復有明顯效果⁴

▶ 輔酶Q10保護眼球有助於減低手術造成的相關損害⁶

交聯透明質酸有效


有助於修復受損眼角膜^{3,4,5}



交聯透明質酸

於眼球表面形成長效的鎖水網

使紓緩作用更持久^{7,8}

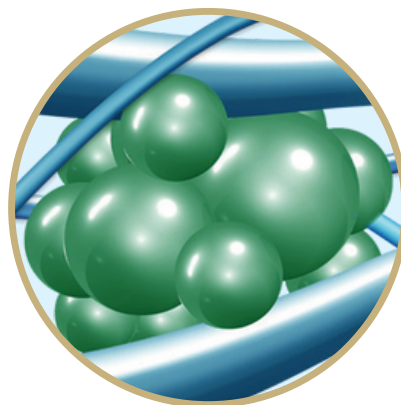

維舒滴® 潤眼液

使用方法
每日兩次，或按眼科醫生指示，每次1-2滴維舒滴®潤眼液滴於眼角膜處。

如何使用 維舒滴®



移除瓶蓋。



將瓶端滴管拉下，頭仰後，眼向上望，輕輕拉開下眼瞼，然後輕按瓶身底部，將1-2滴維舒滴®潤眼液滴於眼角膜處。



使用完後請立即蓋好瓶蓋。開封後可重複使用180天。

警告

- 用後產生任何過敏或不良反應，請停止使用及諮詢你的眼科醫生。
- VisuXL®潤眼液適合配戴隱形眼鏡人士使用，不會因此而影響效果，甚至可滋潤軟性隱形眼鏡。
- 如同時使用其他眼睛藥物，請於使用其他眼睛藥物後五分鐘才可應用VisuXL®潤眼液。
- 本產品於開封後可**保質180天**。
- 有效日期適用於包裝完整並正確保存的產品。
- 切勿於包裝上列明的有效日期後使用本產品。
- 使用本產品前請先清潔雙手。
- 切勿讓瓶端滴管接觸到眼睛。
- 如包裝受損，切勿使用。
- 存放於攝氏15-25度及遠離兒童可觸及的陰暗地方。
- 只供外用，切勿吞服。